

DETERMINACIÓN DE MARCADORES DE INFECCIÓN POR HIV

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA: No se requiere ninguna preparación especial del paciente. Se puede enviar sangre entera o suero refrigerado.

SANGRE ENTERA: Se recoge sangre en plástico seco.

La muestra de sangre entera debe llegar al laboratorio de proceso dentro del día de la extracción y ser mantenida a temperatura ambiente.

Rotular los tubos con el CÓDIGO COMPLETO concordante con la ficha de solicitud.

El código del paciente estará compuesto por:

S NNAA dd/mm/aaaa

S: Sexo (F/M)

NN: 2 primeras letras del primer nombre AA: 2

primeras letras del apellido dd/mm/aaaa: Fecha de nacimiento con año completo

SUERO

Se recoge sangre en plástico seco.

El suero debe separarse en el transcurso del día de extracción, según los pasos indicados a continuación:

-Centrifugar el tubo tapado durante 15 minutos a 1000g.

-Destapar el tubo con guantes limpios y transferir a tubo plástico.

ROTULAR los tubos con el CÓDIGO COMPLETO concordante con la ficha de solicitud. Refrigerar.

El tubo DEBE ir acompañado de la ficha de solicitud correspondiente, completa y firmada por el médico derivante. Los datos de la ficha, deben coincidir con el rótulo del tubo.

OBSERVACIONES: Por favor hacer conocer esta información al personal involucrado en este procedimiento.

LAS MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS NO SERÁN PROCESADAS

Días y horarios de recepción de muestras lunes a viernes de 8 a 13 horas

Centro Provincial de Referencia HIV/SIDA y HEPATITIS VIRALES