

DIAGNÓSTICO DE RABIA

ORGANISMO SOLICITANTE.....

Protocolo N°.....

Fecha:/...../.....

DATOS DE MUESTRA MURCIÉLAGO

Marcar si se remite VIVO o MUERTO

Fecha:/...../.....

LUGAR DE HALLAZGO O ACCIDENTE:

.....
Causa certera o aparente de muerte:.....

Fecha de la muerte del
animal:.....

SIGNOS CLÍNICOS: EXCITACIÓN AGRESIVIDAD PARÁLISIS POSTRACIÓN OTROS

Tipo de Exposición:

Sin contacto

Con contacto: HUMANO ANIMAL

Observaciones:.....

DATOS DE OTRO ANIMAL (distinto a murciélago)

Especie:..... Nombre (en caso de especies domésticas):..... Raza:.....

Sexo:..... Edad:..... Tamaño:..... Pelaje:.....

Vacunado contra la rabia: SI - NO Fecha:/...../.....

Material remitido:.....

Signos clínicos:.....

Diagnóstico presuntivo:.....

Fecha de muerte del animal:/...../.....

Observaciones:.....

DATOS DEL PORTADOR DEL ANIMAL

Apellido y nombres:.....

DNI..... Domicilio:.....

Teléfono:.....

Localidad:..... Municipalidad:.....

Correo electrónico:.....

DATOS DEL / LOS EXPUESTOS

Apellido y nombres:

Domicilio: Teléfono:

Localidad: Municipalidad:

Fecha del accidente:/...../.....

Observaciones:.....

Lugar y fecha:/...../.....

Sello Municipal:

Firma y sello de Profesional Responsable.

Firma recepción del laboratorio:

ENVÍO DE MUESTRAS

Envase para envío de material biológico:

Colocar la muestra en el envase primario (preferentemente de polipropileno), con tapa a rosca.

Identificar la muestra (ROTULAR) con LOS DATOS DE LA FICHA EPIDEMIOLOGICA.

Envolver él o los envases primarios con material absorbente.

Introducir en el envase secundario. Agregar material absorbente para impedir cualquier movimiento durante el traslado.

Cerrar la tapa a rosca del envase secundario de plástico.

Introducir el envase secundario en el envase terciario.


Colocar el protector de cartón, sobre la tapa del envase secundario.

Cerrar el envase terciario.

Adherir la etiqueta autoadhesiva, identificando el contenido como material infeccioso y/o perecedero.

Asegurar el cierre con cinta transparente de embalaje.

INCLUIR FUERA DEL TRIPLE ENVASE LA FICHA EPIDEMIOLOGICA COMPLETA.

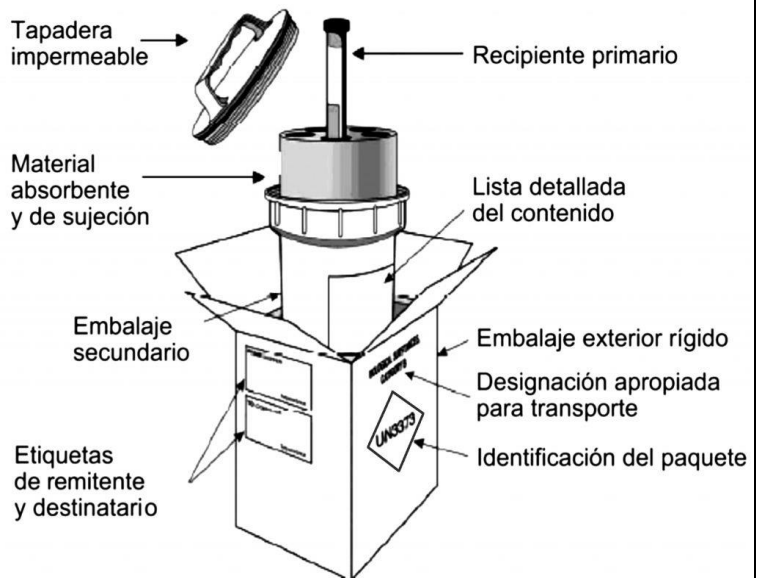

Los resultados de las pruebas diagnósticas, se podrán retirar por EL CENTRO DE ZOONOSIS CORRESPONDIENTE a partir de los 25 días hábiles.

Nota: Toda persona que haya tomado contacto directo con un animal sospechoso (mordido, arañado, lamido, etc.), debe concurrir al Centro Asistencial más próximo, para consulta médica.